



WIRKLICH
WIRKSAMES
WISSEN

Hörgeräte

Arten, Reinigung und Pflege

Im-Ohr-Gerät (IO-Gerät)¹



Für leichte bis mittelschwere
Hörminderung geeignet.

Reinigung¹:

- 1-2x wöchentlich
- mit weichem Tuch
Oberfläche und
Mikrofonöffnung

Umgang²:

- ✓ Hörgerät vor Schmutz schützen
- ✓ kein Haarspray bei eingesetztem Gerät
- ✓ keine starke Hitze
- ✓ nicht in feuchten Räumen oder beim Duschen tragen
- ✓ Gehörgang muss vor dem Einsetzen trocken sein
- ✓ über Nacht im Trocknungsbeutel/Dose aufbewahren

Erstellt durch PB/SBG

Hinter-dem-Ohr-Gerät (HdO-Gerät)¹



Für jede Form der Hörminderung geeignet,
besonders leistungsstark.

Reinigung¹:

- 1-2x wöchentlich
- Schlauchende vom Hörgerät
trennen
- Ohrstück & Schlauch mit
Speziallösung säubern, gut
trocknen
- Reinigung vom Hörsystem mit
weichem Tuch

Quellen: siehe Rückseite

Quellen:

- 1) Neuroth (o.J.) Hören. Verstehen. Erleben. Ein Ratgeber zum besseren Hören. Broschüre der Firma Neuroth
- 2) Lauster M., Drescher A., Wiederhold D., Menche N. (2014) Pflege Heute. Lehrbuch für Pflegeberufe. Elsevier Verlag

Bilder:

HdO Gerät: <https://wirhoeren.de/hoergeraete-fragen-und-antworten/hinter-dem-ohr-hoergeraete/> (Zugriff 14.01.2020)

IO Gerät: <https://wirhoeren.de/hoergeraete-fragen-und-antworten/im-ohr-hoergeraete/> (Zugriff 21.01.2020)